


Zur AirSense™ 10 Serie gehören die folgenden Therapiegeräte:  
AirSense™ 10 Elite, AirSense™ 10 AutoSet und AirSense™ 10 AutoSet for Her

1 Schalten Sie Ihr Atemtherapiegerät wie gewohnt ein.

2 Auf der Startseite »Schlafbericht«<sup>1</sup> auswählen. Bedienregler drücken.

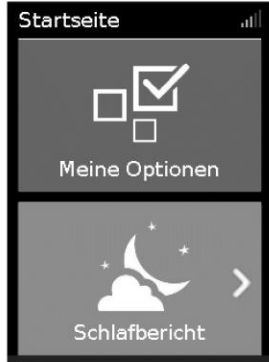

Wenn Patientenmenü »Std.« ausgewählt ist (Voreinstellung)

Zu »Gesamtnutzg.« navigieren, der Wert entspricht den gesamten Nutzungsstunden.



Patientenmenü »Plus« bzw. Klinisches Menü

Zu »Gesamtnutzg.« unterhalb von Detailinfo navigieren.

Alternativ für zeitraumbezogene Nutzung den entsprechenden »Zeitraum« auswählen und darunter die Werte zu Nutzung ablesen.



\* Der Begriff »Betriebsstunden« referenziert hier die Gesamtnutzungsstunden des Geräts.

<sup>1</sup> Der Schlafbericht erscheint auch immer beim Ausschalten des Geräts.