

Therapiedaten SOMNOsoft 2(HMV 14.24.20.0053)

Gesamt-Therapiedauer

Gerät einschalten 

Tages-Therapiedauer


Gerät ausschalten 

Info-Menü öffnen


Status: Gerät ausgeschaltet



❶ Info-Taste kurz drücken.

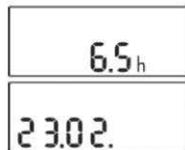

Anzeige:
im Wechsel Datum/Uhrzeit und
Therapieparameter

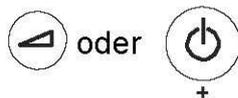

❷ Datum/Zeitraum ändern: - oder +



❸ Kurz drücken, um zum nächsten
Therapieparameter zu wechseln (falls Funktion
vom Arzt freigeschaltet).