


Austausch der Patientenlufteinlass-Filter

Die Patientenlufteinlass-Filter befinden sich in einem Magnetfilterhalter auf der Rückseite des Beatmungsgeräts. Waschbarer Filter (grau): Mindestens einmal jährlich austauschen, mindestens einmal wöchentlich waschen. Einwegfilter (weiß): Mindestens alle vier Wochen austauschen, bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.

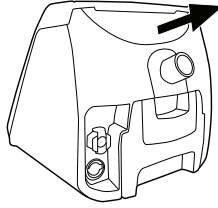

Symbole

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	SD-Karte eingelegt und funktionsfähig
	Schwesternruf angeschlossen
	Fernalarm angeschlossen
	SpO ₂ angeschlossen
	Befeuchter aktiviert
	Schlauchheizung aktiviert
	Wecker aktiviert
	Alle Alarme sind ausgeschaltet
	Netzbetrieb
	Betrieb über externe Gleichstromversorgung
	Ladezustand der Batterie (nur Vivo 3)

Vivo 1/2/3

Kurzanleitung
Dok. 007688 De rev Y-2
2019-12-16



BREAS

Breas Medical AB · Företagsvägen 1
SE-435 33 Mölnlycke · Sweden
Phone +46 31 86 88 00 · Fax +46 31 86 88 10
Find your local distributor at www.breas.com



DEUTSCH



2797



vivo[®]
by Breas

From hospital to home


Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung für das Vivo 1/2/3. Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.


Anschluss des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu arretieren.

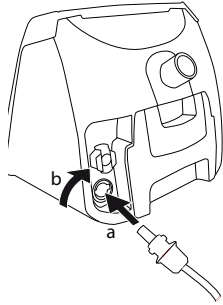


Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

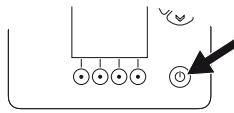

Anschluss des Patientenschlauchsystems


1. Schließen Sie das Patientenschlauchsystem am Patientenluftauslass des Beatmungsgeräts an.

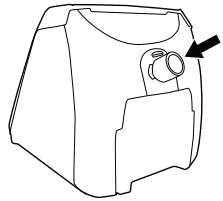

2. Wenn Sie ein neues oder modifiziertes Patientenschlauchsystem anschließen, führen Sie einen Inbetriebnahmetest durch (über den Bereich Sonstige).
3. Schließen Sie das andere Ende des Patientenschlauchsystems an ein Ausatemventil oder an einen Patientenanschluss mit integriertem Ausatemventil an.

Zubehöranschlüsse

Das SpO₂-Modul kann mit dem SpO₂-Adapterkabel am Beatmungsgerät (Position 1) oder am Zubehörmodul angeschlossen werden. Das Zubehörmodul kann auch zum Anschließen der Fernalarmeinheit oder des Schwesternruftkabels verwendet werden.

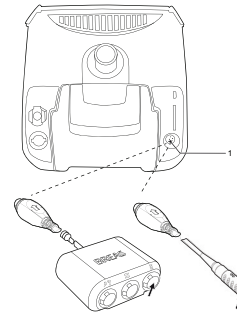


Sauerstoffanschluss (Zubehör)




- O₂ muss abgeschaltet werden, wenn das Vivo 1/2/3 nicht im Betriebsmodus ist!
- Es wird empfohlen, die Sauerstoffkonzentrationen zu überwachen.
- Die Sauerstoffzufuhr darf 30 l/min nicht überschreiten.

1. Befestigen Sie den Sauerstoffschlauch am Anschluss.

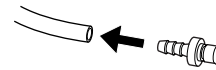


2. Schließen Sie den Sauerstoffschlauch an. Wenn der Schlauch ordnungsgemäß angebracht wird, ist ein Klicken zu hören.

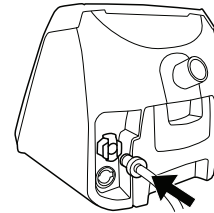


Trennen:

1. Schalten Sie die Sauerstoffquelle ab.
2. Betätigen Sie den Löseknopf, um den Sauerstoffschlauch zu trennen.
3. Nehmen Sie den Schlauch ab.

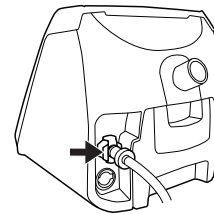

Starten/Beenden der Therapie

1. Halten Sie die Start/Stopptaste am vorderen Bedienfeld gedrückt, um die Therapie zu beginnen.

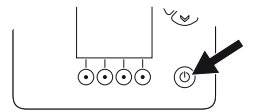

2. Lassen Sie die Start/Stopptaste los, sobald die Fortschrittsanzeige gefüllt ist.



1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste am vorderen Bedienfeld gedrückt, um die Therapie zu beenden und in den Standby-Modus zu wechseln.

2. Lassen Sie die Start/Stopptaste los, sobald die Fortschrittsanzeige gefüllt ist.



3. Führen Sie eine der beiden folgenden Aktionen aus: Drücken Sie die Alarmstummhaltungstaste (a) oder die Rampentaste (b).

