

Quattro™ Air – Komponentenkarte



Quattro Air Kopfband
62757 Small
62756 Standard



Quattro Air for Her Kopfband
62758 Small
62759 Standard



Kniestück mit Entriegelungsglaschen
62762



Maskenrahmen
62760 (XS/S)
62761 (M/L)



Maskenkissen
62736 (XS)
62737 (S)
62738 (M)
62739 (L)

Artikelnummern

Quattro Air Maskensystem Small	62705
Quattro Air Maskensystem Medium	62706
Quattro Air Maskensystem Large	62707
Quattro Air for Her Maskensystem Extra Small	62743
Quattro Air for Her Maskensystem Small	62744
Quattro Air for Her Maskensystem Medium	62745

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

Quattro™ Air – Anpassungsleitfaden



- Nehmen Sie das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken.
- Ziehen Sie das Kopfband mit geöffneten unteren Kopfbändern über den Kopf.



- Ziehen Sie die beiden Bänder des oberen Kopfbands gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.



- Führen Sie die unteren Kopfbänder unter Ihren Ohren entlang und schieben Sie sie über die Aufnahmen am Maskenrahmen.



- Ziehen Sie die unteren Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt.
- Die Maske sollte fest, aber bequem und sicher sitzen.
- Nicht zu fest anziehen!



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Geräts.
- Bringen Sie das Kniestück an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenkörper drücken.
- Schalten Sie das Gerät ein.



- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.
- Wiederholen Sie den Schritt für die unteren Kopfbänder
- Ihre Maske ist nun gebrauchsfertig.



Quattro Air for Her ist so gestaltet, dass die Haare über oder unter dem Kopfband getragen werden können.

Quattro™ Air
Quattro™ Air for Her
FULL FACE MASKE

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Quattro Air Full Face Maske.

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried, Tel 089 9901-00, Fax 089 9901-1055, E-Mail reception@resmed.de