



made for you!



JOYCEone

# JOYCEone

## Ihre 1. Wahl: zeitsparend und passgenau

Zeitraubendes Einstellen war gestern. Heute bieten wir Ihnen mit JOYCEone die Beatmungsmaske in einer Größe, die nahezu immer passt. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Maskenexpertise und als Nasal- oder Mund-Nasen-Variante erhältlich.

### Hand in Hand: Wohlfühlkomfort und Therapieerfolg

Die Stirnstütze sorgt mit ihrem flexiblen Federprinzip automatisch dafür, dass sie immer therapiegerecht im richtigen Abstand stabil und zugleich komfortabel an der Stirn aufliegt. Ähnlich clever funktioniert der einschichtige Maskenwulst. Dank seiner optimierten Form findet er von selbst die ideale Position – unabhängig von der Nasen- bzw. Gesichtsgröße.

### Durchdacht bis ins Detail

Ihre Patienten werden JOYCEone vom ersten Kontakt an lieben! Denn bei JOYCEone überzeugen nicht nur Passgenauigkeit und Tragekomfort, sondern auch die leichte Bedienung: Durch die unverwechselbare Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips mit Griffmulde lässt sich JOYCEone von Anfang an schnell und korrekt montieren.

### Moderne Effizienz

Kurz und gut: Das intelligente JOYCEone-Prinzip unterstützt Sie, Ihre Zeit optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung machen zu müssen. JOYCEone – made for you!

### Die Vorteile von JOYCEone

- Zeitsparend: Automatische Anpassung von Stirnstütze 3 und Maskenwulst 1
- Unverwechselbare Montage: Eindeutige Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips 4
- Wirtschaftlich: Eine Größe passt nahezu allen Patienten
- Bequem: Mühelose Reinigung
- Angenehm: Leises Ausatemsystem
- Stabil: Extrem belastbare Materialien


#### JOYCEone Nasal

Maskensitz bei verschiedenen Nasengrößen



#### JOYCEone Full Face

Maskensitz bei verschiedenen Nasen- und Gesichtsgrößen

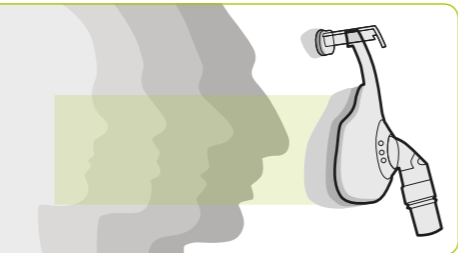

- 1 Maskenwulst
- 2 Stirnpolster
- 3 Stirnstütze
- 4 Bänderungsclip
- 5 Klettzungen
- 6 Druckmessanschluss
- 7 Reißleine (nur JOYCEone Full Face)



JOYCEone Nasal-Maske

# JOYCEone Nasal



JOYCEone Full Face  
Mund-Nasen-Maske

Ersatzteile

<b>Kopfbänderung</b> inkl. Bänderungsclips WM 25255 	<b>Stirnstütze</b> <b>JOYCEone Nasal</b> inkl. Stirnpolster, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 15907 	<b>Drehhülse</b> <b>JOYCEone Nasal</b> WM 26846 <b>JOYCEone Full Face</b> WM 26847 
<b>Bänderungsclips</b> 2 Stück WM 25257 	<b>Maskenwulst</b> <b>JOYCEone Nasal</b> Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 25253 	<b>Set Kugelgelenk</b> <b>JOYCEone Nasal</b> Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Verschluss WM 15908 
<b>Stirnpolster</b> Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 26801 	<b>Reißeleine</b> Schnellentriegelung WM 26890 	<b>Verschluss Druckmess- anschluss</b> WM 26849 
		<b>Transportbeutel</b> WM 26295 

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter [weinmann-medical.com](http://weinmann-medical.com)


Technische Daten	JOYCEone Nasal		JOYCEone Full Face	
	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face
<b>Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG</b>	II a			
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	ca. 96 x 115 x 83 mm	ca. 120 x 150 x 100 mm		
<b>Gewicht</b>	87 g	100 g		
<b>Therapiedruckbereich</b>	4 bis 30 hPa			
<b>Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1</b>	Ø 22 mm (männl.)			
<b>Druckmessanschluss</b>	Ø 4 mm			
<b>Breite Bänderungsclip</b>	24 mm			
<b>Temperaturbereich</b> ■ Betrieb: ■ Lagerung:	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +70 °C			
<b>Strömungswiderstand</b> ■ bei 50 l/min ■ bei 100 l/min			0,05 hPa 0,28 hPa	
<b>Strömungswiderstand Notfallausatemventil</b> ■ Inspiration bei 50 l/min: ■ Expiration bei 50 l/min:			- -	0,5 hPa 0,5 hPa
<b>Schalldruck Notfallausatemventil</b> ■ Öffnen: ■ Schließen:			- -	1 hPa 2 hPa
<b>Angegebener Zweizahl- Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871</b> ■ Schalldruckpegel: ■ Schalleistungspegel: ■ Unsicherheitsfaktor:			15 dB(A) 23 dB(A) 3 dB(A)	
<b>Gebrauchsdauer</b>	bis zu 12 Monate <sup>1</sup>			
<b>Angewandte Normen</b>	EN ISO 17510-2:2009			

<sup>1</sup> Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

Geräte-Bezeichnung	WM-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEone Nasal	WM 25260	14.24.16.2052
JOYCEone Full Face	WM 25290	In Beauftragung



83099-DE-11/2014 © Urheberrechtlich geschützt. Verweigerung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

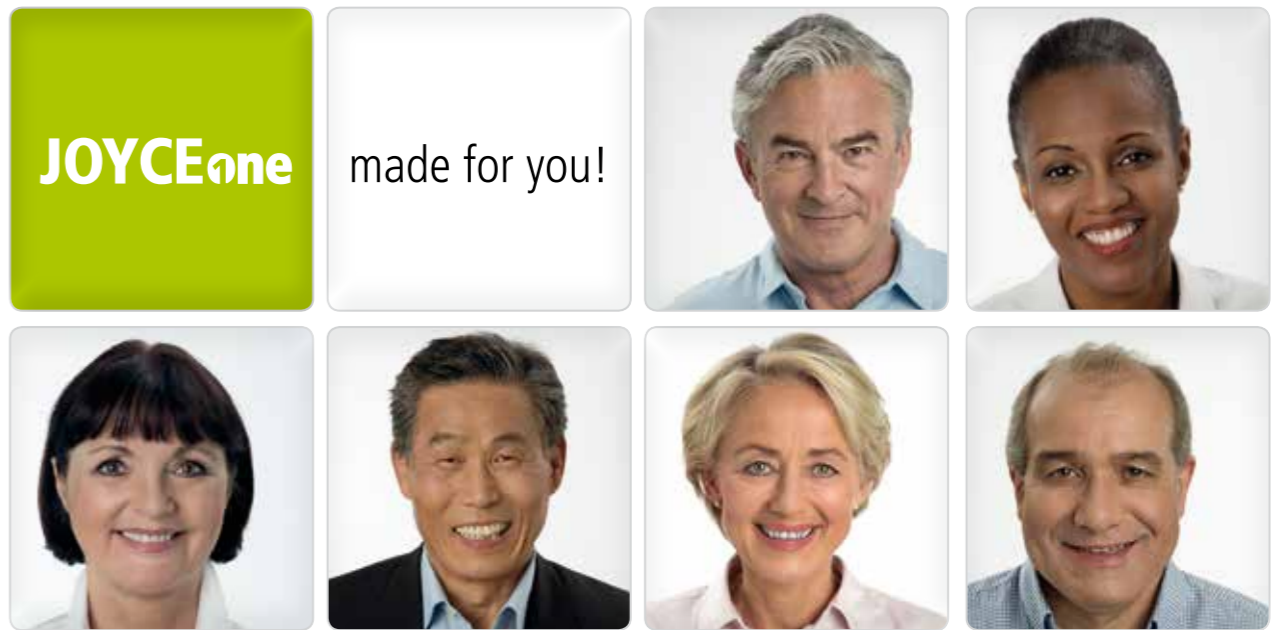

# JOYCEone

# Full Face