

Komponentenkarte



Kopfband
62129 (Pink)
62138 (Grau)



Maskenrahmen
62143



Kniestück
62114



Maskenkissen
62136

Artikelnummer

Mirage FX for Her **62132**

 Einzelheiten hierzu finden Sie in der **Gebrauchsanweisung der Mirage FX for Her Nasenmaske.**

Mirage™ FX for Her
NASENMASKE

www.resmedmiragefx.com

Anpassungsleitfaden



- 1 Nehmen Sie vor dem Anlegen der Maske das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die beiden seitlichen Laschen drücken.



- 2 Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Gerätes.



- 3 Halten Sie die Maske mit geöffneten unteren Kopfbändern an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- 4 Führen Sie nun die unteren Bänder unterhalb der Ohren entlang und schieben Sie diese über die Aufnahmen des Maskenrahmens.



- 5 Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.



- 6 Wiederholen Sie Schritt 5 mit den unteren Kopfbändern.



- 7 Bringen Sie Kniestück und Atemschlauch an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenrahmen stecken.
- 8 Schalten Sie das Gerät ein.



- 8 Passen Sie gegebenenfalls das hintere Band an.
- Ziehen Sie die Bänder nicht zu stramm an.
- Das hintere Band kann über oder unter zusammengebundenem oder offenem Haar getragen werden.

Mirage™ FX for Her
 NASENMASKE

www.resmedmiragefx.com

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, DEUTSCHLAND. Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **CE** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Mirage ist eine Marke von ResMed Ltd und ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. Velcro ist eine Marke der Velcro Industries B.V. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015456/1 2012-03

Hersteller: ResMed Ltd
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australien.

CE
 0123

Obj.-ID.: C94829 - 1