



2 Menüzugriff

Zugang zum vollständigen Menü und zum Ändern von Einstellungen

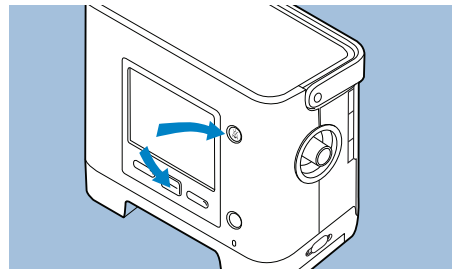


Ist der Menüzugriff gesperrt und erscheint nach Einschalten des Gerätes das nicht, so gelangen Sie wie folgt in das Einstellmenü: Drücken Sie einige Sekunden lang und .

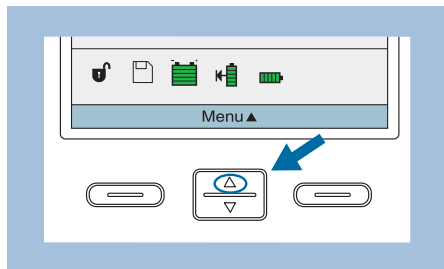


Wenn nach dem Drücken des Ein-/Aus-Schalters auf dem Bildschirm zu sehen ist, haben Sie bereits vollständigen Menüzugriff. Drücken Sie , um in das Menü zu gelangen.


Zugang zu allen Einstellungen beibehalten

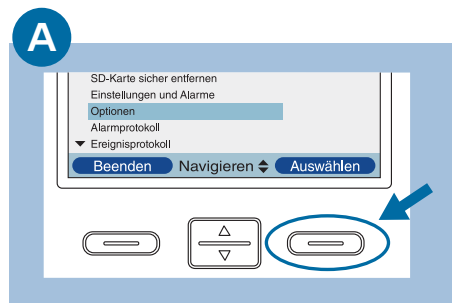


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Optionen“ und drücken Sie **Auswählen**.

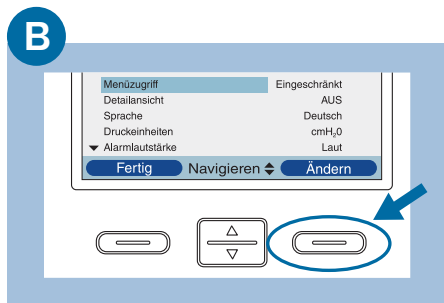

Drücken Sie **Ändern**, um in den **Menüzugriff** zu gelangen.

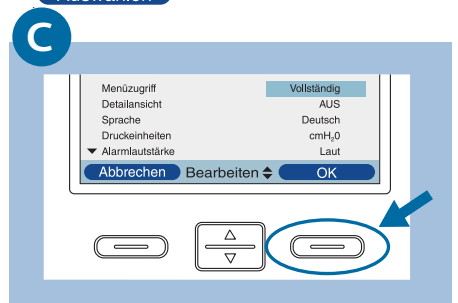

Wechseln Sie mit zur Option „Vollständig“ und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

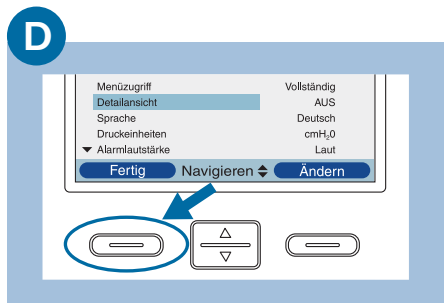

Drücken Sie **Fertig** und **Beenden**. Das Gerät schaltet sich ab. Über die Ein-/Aus-Taste gelangen Sie in das Beatmungsmenü.



© 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Geräte jederzeit technisch zu verändern und/oder die Herstellung eines Produkts ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch dieses Dokuments entstehen.

Broudy AM 9/25/15 MCI 4106921 PN 1057962

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 US

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

www.philips.de/respironics


PHILIPS
RESPIRONICS

Trilogy100

Kurzanleitung

- 1 Übersicht
- 2 Menüzugriff
- 3 Anschluss Schlauchsystem
- 4 Einstellen der Beatmung

1 Übersicht

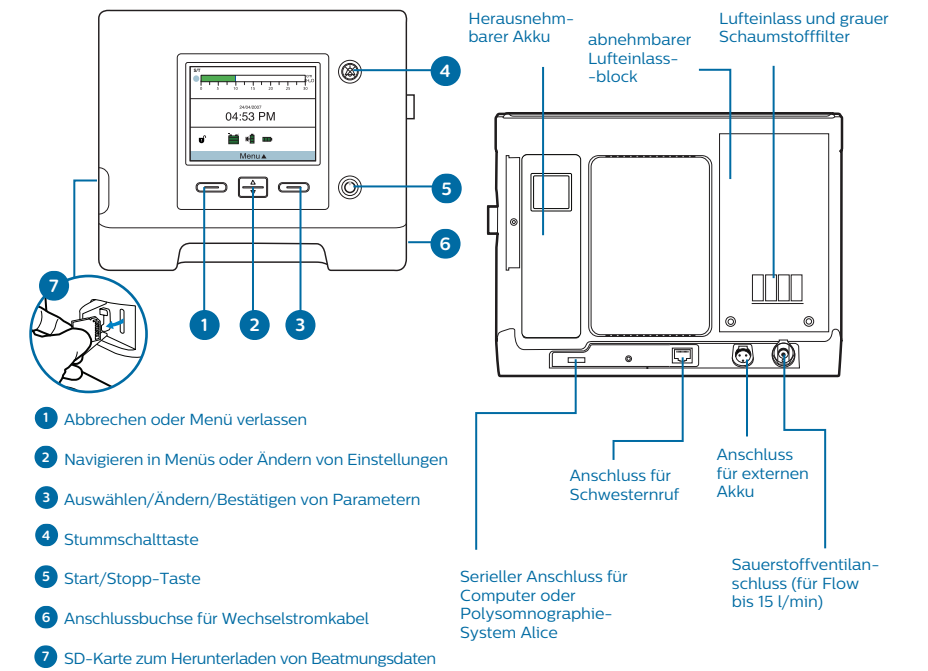

- 1 Abbrechen oder Menü verlassen
- 2 Navigieren in Menü oder Ändern von Einstellungen
- 3 Auswählen/Ändern/Bestätigen von Parametern
- 4 Stummschalttaste
- 5 Start/Stopptaste
- 6 Anschlussbuchse für Wechselstromkabel
- 7 SD-Karte zum Herunterladen von Beatmungsdaten

Herausnehmbare Akku
abnehmbarer Lufteinlassblock
Lufteinlass und grauer Schaumstofffilter
Anschluss für Schwesteranruf
Anschluss für externen Akku
Sauerstoffventilananschluss (für Flow bis 15 l/min)
Serieller Anschluss für Computer oder Polysomnographie-System Alice


Symbole und Zeichenerklärung

	Modus mit vollständigem Menüzugriff		Statusanzeige für herausnehmbaren Akku
	SD-Karte im Beatmungsgerät		Statusanzeige für internen Akku
	Stummschalttaste aktiv		Statusanzeige für externen Akku
	Rampe aktiv		Akku wird geladen.


3 Anschluss Schlauchsystem

Vor der Inbetriebnahme des Trilogy100 müssen Sie das Schlauchsystem konfigurieren.


Konfiguration mit aktivem Ausatemventil

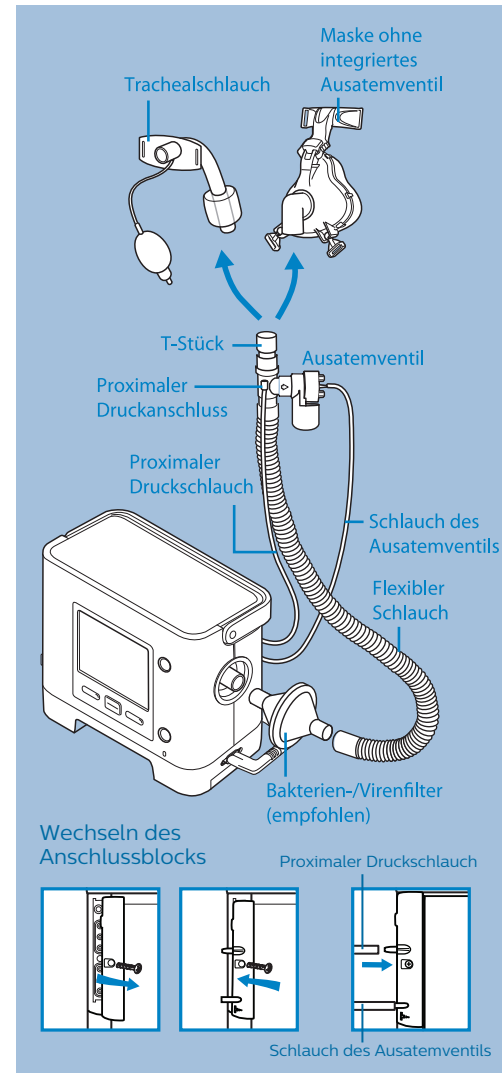


Konfiguration mit passivem Ausatemventil

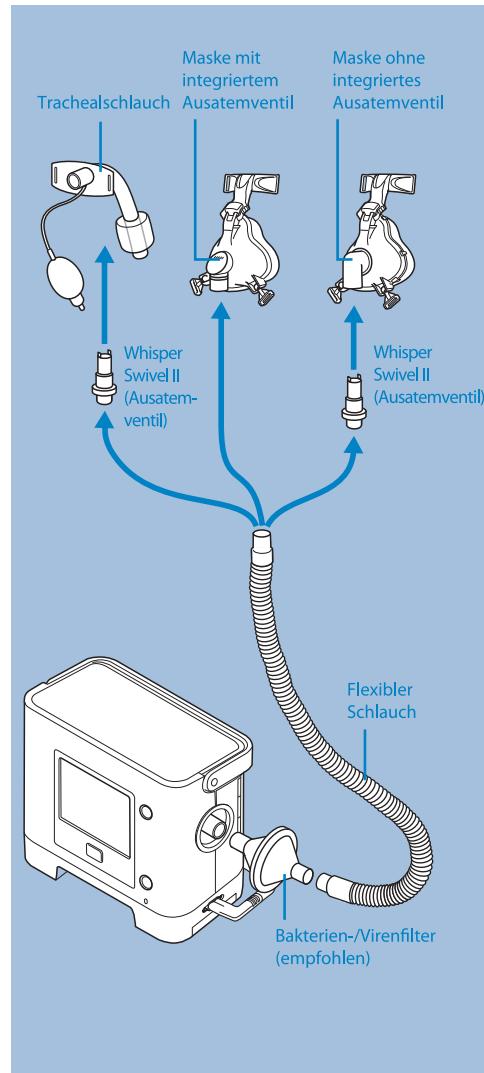


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen

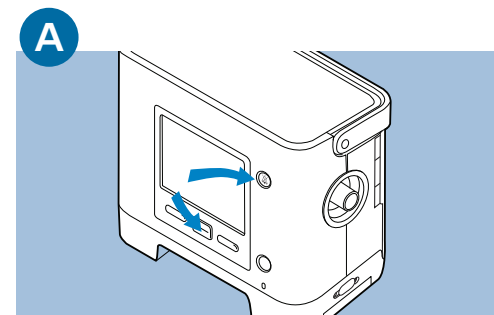


Drücken Sie einige Sekunden lang und , um das Einstellmenü aufzurufen.

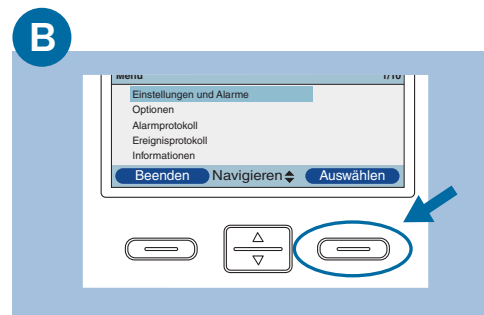


Wählen Sie „Einstellungen und Alarme“ aus.

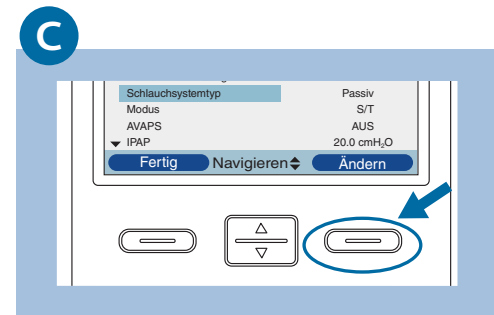

Navigieren Sie zum Menüpunkt „Schlauchsystemtyp“ und drücken Sie **Ändern**.

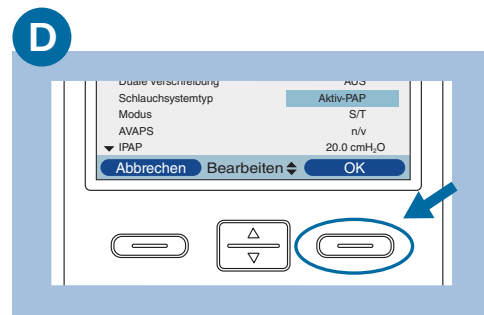


Wählen Sie „Aktiv PAP“ (aktives Ausatemventil) oder „Passiv“ (passives Ausatemventil) aus, und drücken Sie **OK** zur Bestätigung zweimal.

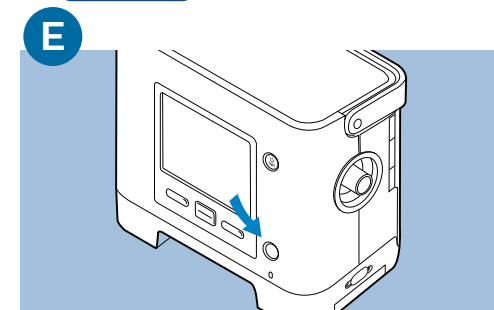


Drücken Sie , um das Gerät zu betreiben oder um zum weiteren Einstellen der Beatmungsparameter durch das Menü zu navigieren. (siehe Punkt 4: Einstellen der Beatmung)

Überprüfen Sie, ob das Schlauchsystem richtig konfiguriert wurde.


4 Einstellen der Beatmung

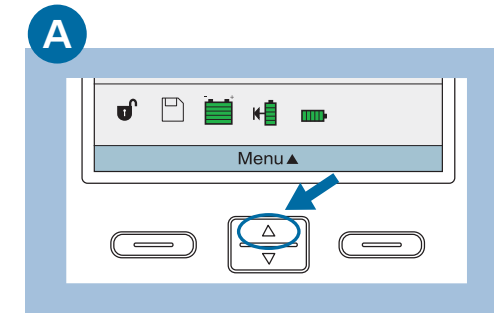


Drücken Sie auf dem Ausgangsbildschirm „Menü“.

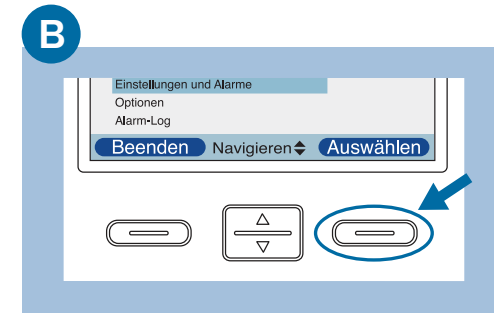


Wählen Sie „Einstellungen und Alarme“ aus.

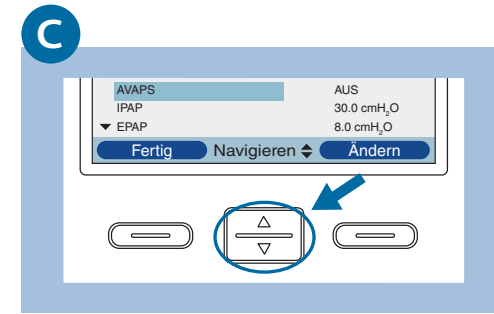


Drücken Sie , um durch die Einstellungen und Alarme zu navigieren.

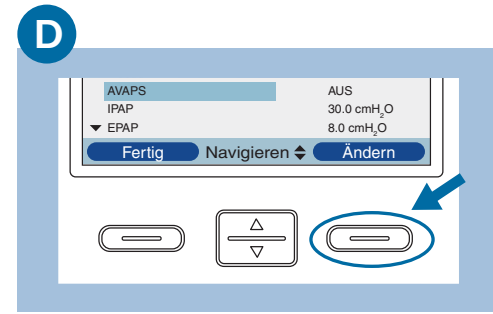


Drücken Sie **Ändern** , um den blau markierten Parameter zu ändern.

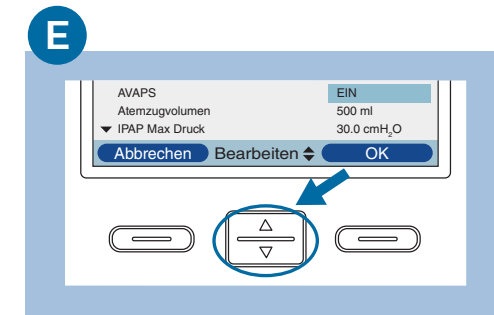

Ändern Sie mit den Wert oder Status der Einstellung.

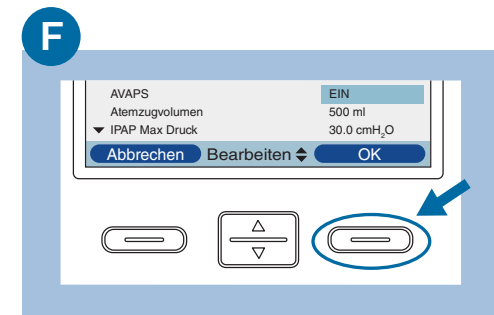


Drücken Sie **OK** , um die neue Einstellung zu bestätigen.

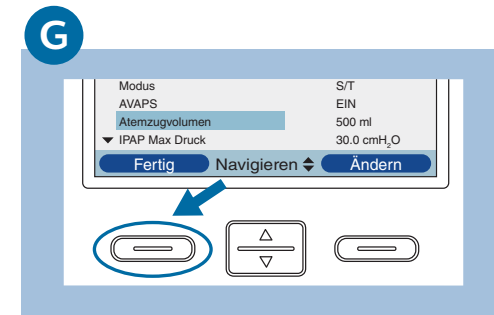


Drücken Sie **Fertig** und **Beenden** , um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

Duale Verschreibung

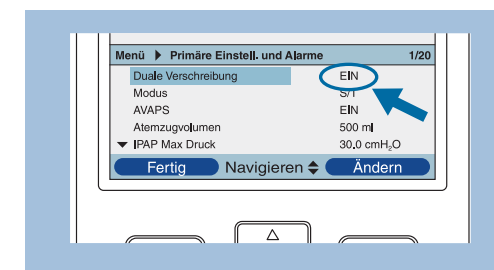

Wenn der Menüpunkt „Duale Verschreibung“ aktiviert ist, müssen beide Verschreibungen wie erläutert eingestellt werden.

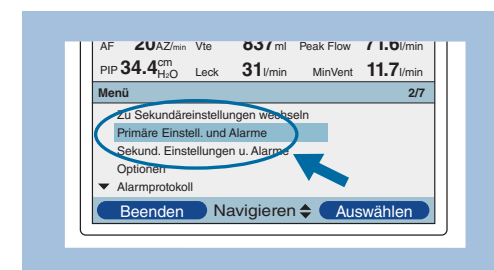

Es sind 2 Verschreibungseinstellungen vorzunehmen.