

## Ablesen der Betriebsstunden (Anwenderstunden) bei DeVilbiss SleepCube Atemtherapiegeräten



### Tastenerklärung

1. AN /AUS
2. Wert erhöhen / verringern
3. Befeuchter-LED
4. Verzögerung (Rampe)
5. Taste: Zurück
6. Taste: Vor

- A) Schalten Sie das Atemtherapiegerät ein (Taste 1)
- B) Betätigen Sie 5x die Taste: Zurück (Taste 5)
- C) Im Display erscheint nun die Information „Anwenderstunden“
- D) Lesen Sie die dortige Stundenzahl ab
- E) Schalten Sie das Gerät aus (Taste 1)