









Geräteart	Hersteller	Gerätetyp	Funktion
<p>nCPAP</p> <p>PRSTS-Serie</p>  <p>-Somnia3 -Phönix3 -PRSTS</p>	<p>Heinen + Löwenstein</p> <p>Phillips/Respironics</p>	<p><b>PRSTS-Serie 2</b> <b>Alle Modelle</b></p>    	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät am Netz. Startbildschirm: Therapie ist hinterlegt</li> <li>2. Die „Unterlegung“ mit Hilfe des Dreh- und Druckknopfes  auf Info drehen und einmal diesen Dreh- und Druckknopfes drücken.</li> <li>3. Mit Hilfe des Dreh- und Druckknopfes  auf Abfrage drehen und einmal diesen Dreh- und Druckknopf drücken.</li> <li>4. Therapie = Therapiestunden</li> <li>5. Zurück zum Startbildschirm:  Option 1 = warten und nichts drücken  Option 2 = mit Hilfe des Dreh- und Druckknopfes  auf Zurück drehen und einmal diesen Dreh- und Druckknopfes drücken. Diese wieder holen bis der Startbildschirm erscheint.</li> </ol>