



Betriebsstundenabfrage DreamStation APAP 14.24.21.0049

1. **(B) Grundbildschirm**



**Meine Infos**

2. **(A) Einmal nach RECHTS drehen auf**



**Mein Betreuer**

und durch einmal drücken (A) in das Menü gehen.

3. **(A) Einmal nach RECHTS drehen auf**

Therapiestunden	0.0
Gebläse	0.0.
Tage > 4	0
Compliance	65450
 Abfrage	

Auf diesem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt:  
 die Therapiestunden insgesamt auf dem Gerät,  
 die Gebläsestunden insgesamt, die Gesamtanzahl der Tage, an denen das Gerät in Behandlungen von länger als 4 Stunden verwendet wurde  
 sowie eine Konformitätsprüfnummer, anhand der  
 Ihr medizintechnischer Betreuer bestätigt, dass die von Ihnen genannten Daten wirklich von diesem Bildschirm stammen.