

Betriebsstunden ablesen: Sauerstoffkonzentrator Typ Zen-O lite®
14.24.06.1001






Halb-Schräg-Ansicht:



Display Ansicht:



Auslesen:

- Gerät am Hauptschalter einschalten 
-  beide Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- warten bis im Display  erscheint
- 3x  Taste drücken bis „RUN Time“ (Betriebsstunden) im Display erscheint
- Gerät ausschalten  zum Verlassen des Menüs