

Betriebsstundenabfrage prismaSMART / prismaSOFT

14.24.20.0073 • 14.24.21.0054

Option1:

- Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur den Netzstecker für die Steckdose.
- Auf dem Gerätebildschirm erscheinen für ein paar Sekunden die Betriebsstunden. Anschließend wird die Uhrzeit angezeigt.



Option2:

- Gerät am Stromnetz. Bildschirm aktivieren = einmal kurz die Ein/Aus-Taste (⏻) drücken.
- Warten bis Standby-Bildschirm erscheint (Uhrzeitanzeige).



- 1 = Minus-Taste*
- 2 = Plus-Taste*
- 3 = Ein/Aus-Taste*
- 4 = Menü-Taste*
- 5 = SoftSTART-Taste*

*Die Tasten des Gerätes können unterschiedliche Funktionen haben. Wenn es im Display ein Symbol über der Taste gibt, nimmt die Taste die Funktion des jeweiligen Symbols an. Wenn es über der Taste kein Symbol gibt, behält die Taste ihre ursprüngliche Funktion.

- Betriebsstunden ablesen:

(A) Menü-Taste drücken.



(B) Um das Info-Menü aufzurufen: drücken (-Taste).

(C) Es blinkt kurz CALC auf (Berechnung für die Anzeige).

(D) erster Zahlenwert 0000h = Betriebsstunden

(D) Mit den Tasten oder zum gewünschten Wert navigieren:

Anzeige	Bedeutung	Beispiel
0000 h	Gesamtbetriebsstunden des Gerätes	3h
1 d	Betriebsstunden für den letzten Tag.	1d03:00h
7 d	Betriebsstunden für die letzten 7 Tage.	7d00:00 h
28 d	Betriebsstunden für die letzten 28 Tage.	28d00:00 h
182 d	Betriebsstunden für die letzten 182 Tage.	182d00:00 h
366 d	Betriebsstunden für die letzten 366 Tage.	358d00:00 h

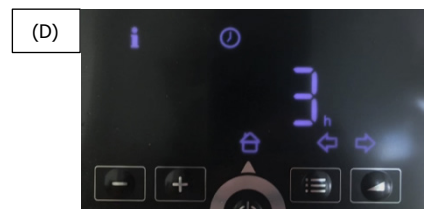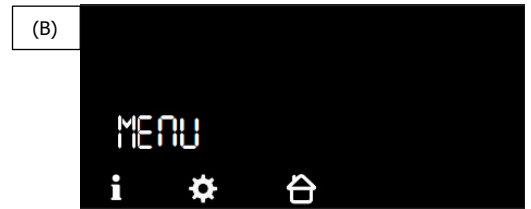

- Menü verlassen drücken (Ein/Aus-Taste ⏻).

- Zusatzinformation: $\pm 0000 \text{ h} = \text{Betriebsstunden} > 9999 \text{ h}$

Beispiel = 10.037 Betriebsstunden

