

## Betriebsstunden auslesen bei der S9 Serie



Das Gerät einschalten / für Stromanschluss sorgen.  
Therapie nicht starten.

Im Ausgangsbildschirm steht STARTSEITE in obersten Zeile.



Info- und Setup-Taste drücken und 4 Sekunden gedrückt halten.



Das erste Icon - Schlafqualität - ist markiert.



Mit dem BedienController das 2. Icon - Schlafbericht - auswählen.



Diese Auswahl mit einem "Klick" auf den BedienController bestätigen, das 2. Icon wird dann gelborange hinterlegt.



Mit dem BedienController im Menü Schlafbericht ganz nach unten scrollen. Als letzter Eintrag in der Liste stehen die Betriebsstunden - ablesen!



Um auf die Startseite zurückzukehren einmal auf den BedienController drücken, wenn "Startseite" hell unterlegt ist

(Oder die i-Taste drücken.)

## Betriebsstunden auslesen S9 - Serie:

ab

1st SN: 23111401798 bei 36115 S9 AUTOSET - TAKE AIR GERMANY

1st SN: 23111401198, bei 36113 S9 ELITE - TAKE AIR GERMANY:

S9 Series Software Update (version 903)

werden die Betriebsstunden wie folgt ausgelesen:

Gerät ist eingeschaltet mit dem Startbildschirm:



Bitte die „i“-Taste drücken:



2x mit dem Rad drehen, die (Motor-) Betriebsstunden werden angezeigt:

